



### TERMO DE GARANTIA

O Esfigmomanômetro Aneróide Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Para o perfeito funcionamento deste aparelho, siga as orientações contidas neste manual de instruções, em caso de dúvidas ligue para **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ACCUMED.**

**SAC-SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ACCUMED: Tel: (21) 2775-8929- ou e-mail [sac@accumed.com.br](mailto:sac@accumed.com.br)**

Importado por:

**ACCUMED - Produtos Médico-Hospitales Ltda.**

Endereço: Rua São Jorge nº 119/ Quadra 70 - Lote 19 a 21 - Vila São Luiz - Duque de Caxias- RJ.

CEP: 25086-110 • CNPJ: 06.105.362/0001-23 • Insc. Est.: 77.701.290

SAC: Tel.: (21) 2775-8929 • e-mail: [sac@accumed.com.br](mailto:sac@accumed.com.br)

Resp. Técnico: Marcos Jordão • CRQ 3ª Região: 03212320

Reg. Anvisa/M.S. Esfigmomanômetro Premium nº 10385180030


Reg. Anvisa Estetoscópio Premium nº 80275310014

Portaria de Aprovação do INMETRO/ DIMEL nº 105 de 11 de julho de 2002.

Fabricante: Wenzhou Instruments Co.- China



Premium

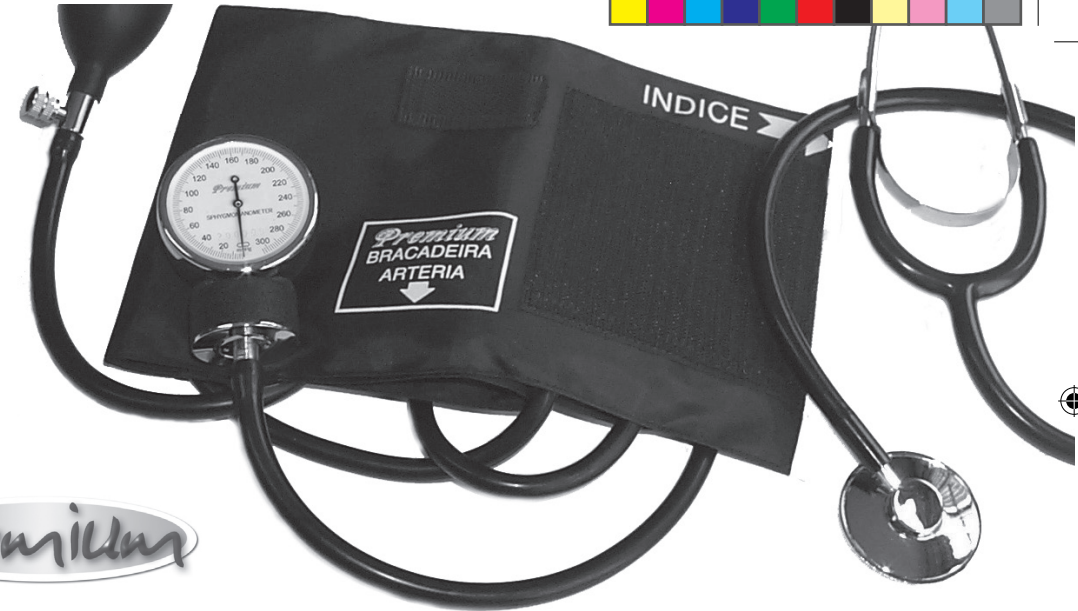

## INSTRUÇÕES DE USO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM COM ESTETOSCÓPIO






### INDICAÇÃO DE USO

O esfigmomanômetro Aneróide Premium é indicado para a medição da pressão arterial sanguínea.

### APRESENTAÇÃO

**Esfigmomanômetro Aneróide Premium Com Estetoscópio:** Bolsa de viagem contendo um esfigmomanômetro aneróide completo, um estetoscópio simples Premium e um manual de instruções.

### DESCRIÇÃO

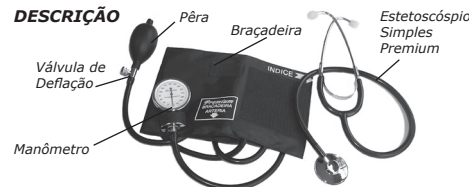

A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc., porém, deve-se

monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo possível a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

### MODO DE USAR

- 1- A medição da pressão arterial deve ser realizada num ambiente calmo, o paciente deve estar relaxado e deve ser repetida diversas vezes em dias diferentes sob as mesmas condições e no mesmo horário.
- 2- Coloque a braçadeira ao redor da parte superior do braço e certifique-se de que esteja diretamente em contato com a pele e que as roupas não estejam apertando o braço;
- 3- Feche a Válvula de Deflação girando o parafuso no sentido horário;
- 4- Através do método palpatório, localize o pulso radial, infle a braçadeira até desaparecer as pulsações, registre esse valor de pressão;
- 5- Coloque o estetoscópio (acessório incluso) sobre a artéria, na parte interna do cotovelo, infle a braçadeira até 20/30 mmHg acima do valor de pressão determinado na etapa anterior;
- 6- Alivie a pressão, abrindo, bem devagar, o parafuso da válvula de deflação, acompanhe a pulsação com

- o estetoscópio;
- 7- O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se conseguiu identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade;
- 8- Continue desinflando até não ouvir mais a pulsação, este ponto de pressão irá corresponder a pressão mínima ou diastólica.
- 9- Continue a aliviar a pressão até desinflar completamente a braçadeira.

*NOTA: Para uma ausculta mais sensível, recomenda-se a utilização do Estetoscópio Duplo, Duplo Cardiológico ou Rappaport da marca PREMIUM.*

### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evite choques!
- Não infle acima de 300 mmHg!
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa.
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais cortantes.
- Sempre desinfele completamente a braçadeira antes de guardá-la.
- Não desmontar o manômetro! Guarde o instrumento completo na bolsa fornecida.
- Limpe o manômetro, a pêra e a braçadeira com tecido suave levemente umedecido com água.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C;
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%;
- Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5 (L) X 52 cm (C);
- Tamanho do Manguito: 12 (L) X 22 cm (C);
- Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg;
- Valor de Uma Divisão: 2 mmHg;
- Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente;
- Tolerância: +/- 3 mmHg

Premium

